



# FreeStyle Libre 14 day


SISTEMA FLASH DE MONITOREO DE GLUCOSA

## Guía de consulta rápida para el lector FreeStyle Libre 14 day



### Resumen de configuración

Consulte su Manual del usuario para obtener instrucciones e información completas del sistema.

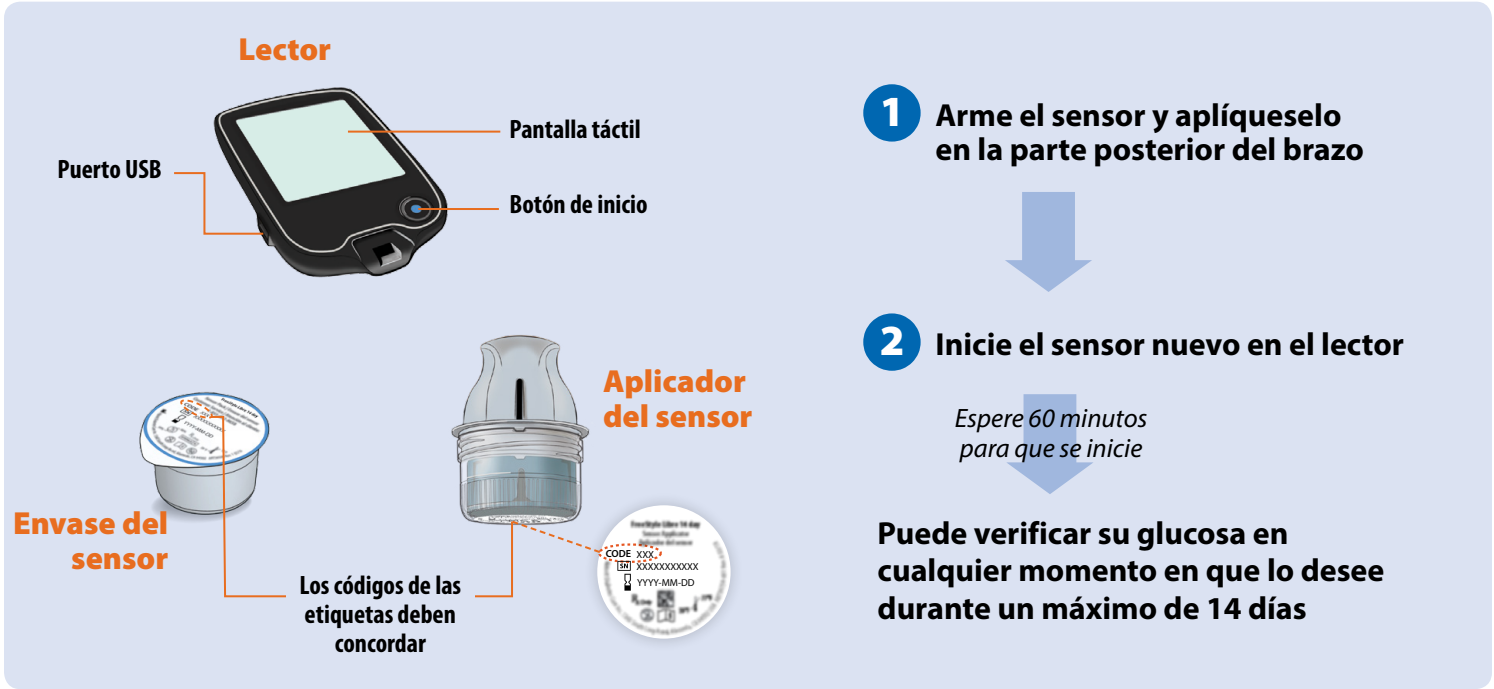

- 1 Arme el sensor y aplíquese en la parte posterior del brazo**
  - 2 Inicie el sensor nuevo en el lector**  
Espera 60 minutos para que se inicie
- Puede verificar su glucosa en cualquier momento en que lo desee durante un máximo de 14 días

## 1 Arme el sensor y aplíquese en la parte posterior del brazo

### Prepárese

#### PASO 1



Seleccione un lugar en la parte posterior del brazo. No use otros sitios ya que estos no están aprobados y pueden generar lecturas de glucosa inexactas.


**Nota:** Evite las cicatrices, lunares, estrías, bultos y sitios de inyección de insulina. Para evitar irritación en la piel, cambie de lugar entre aplicaciones.

#### PASO 2



Limpie el lugar con una toallita humedecida en alcohol. Deje que se seque antes de continuar.

#### PASO 3

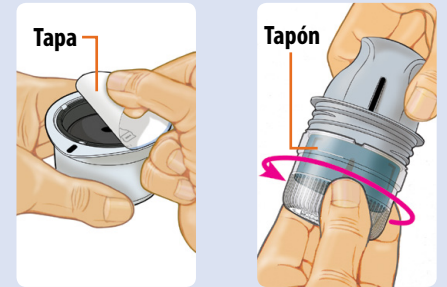


Desprenda por completo la tapa del envase del sensor. Desenrosque el tapón del aplicador del sensor.

**PRECAUCIÓN:** Los códigos del sensor deben coincidir con el envase del sensor y el aplicador del sensor; de lo contrario, las lecturas de glucosa serán incorrectas.




### Prepare el aplicador del sensor

#### PASO 4

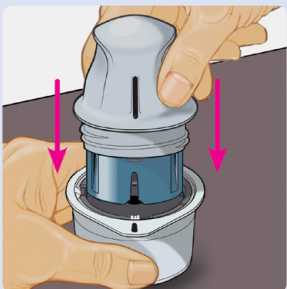

Alinee la marca oscura del aplicador del sensor con la marca oscura del envase del sensor. Sobre una superficie dura, oprima el aplicador del sensor firmemente hacia abajo hasta que se detenga.

#### PASO 5

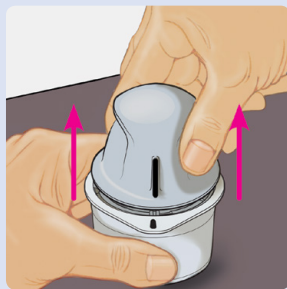

Levante el aplicador del sensor para extraerlo del envase del sensor.

#### PASO 6




El aplicador del sensor está listo para aplicar el sensor.

**PRECAUCIÓN:** El aplicador del sensor ahora contiene una aguja. No toque el interior del aplicador del sensor ni lo coloque de nuevo en el envase del sensor.

### Aplique el sensor


#### PASO 7

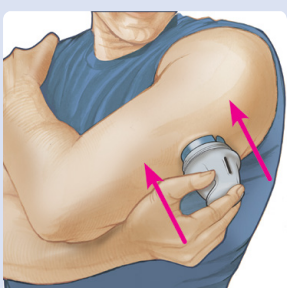

Coloque el aplicador del sensor sobre el sitio y presione hacia abajo con firmeza para aplicar el sensor.


**PRECAUCIÓN:** NO presione hacia abajo el aplicador del sensor hasta que esté colocado encima del lugar preparado para evitar resultados imprevistos o lesiones.

#### PASO 8

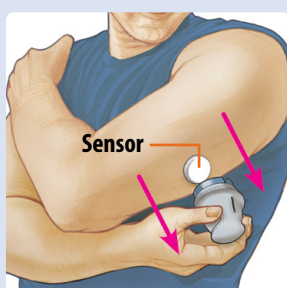

Retire suavemente el aplicador del sensor del cuerpo.

#### PASO 9

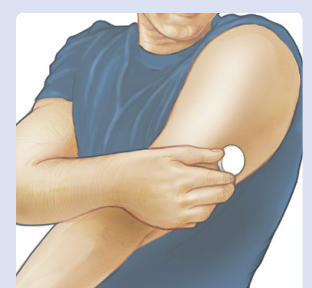


Asegúrese de que el sensor esté firmemente colocado.

Deséchelo el envase del sensor y el aplicador del sensor usados siguiendo los reglamentos locales.



## 2 Inicie el sensor nuevo en el lector


### PASO 1

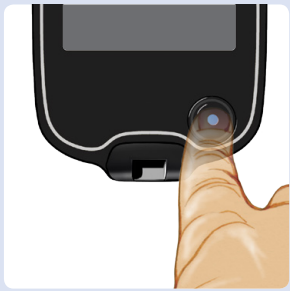

Oprima el botón de inicio para encender el lector.

**Nota:** Si está usando el lector por primera vez, siga las indicaciones para configurar la fecha, hora y rango deseado de glucosa.

### PASO 2

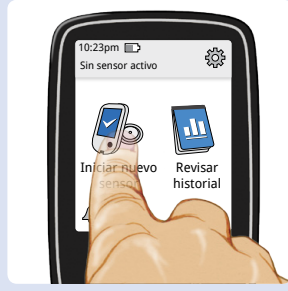

Toque **Iniciar nuevo sensor**.

### PASO 3




Sostenga el lector a menos de 1.5 pulgadas (4 cm) del sensor para escanearlo.

El sensor se podrá usar para revisar su glucosa después de 60 minutos.

## 3 Verifique su glucosa

### PASO 1

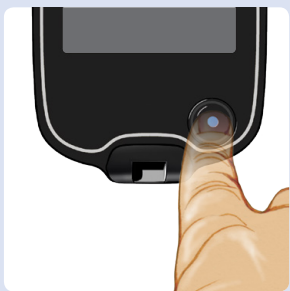

Oprima el botón de inicio para encender el lector.

### PASO 2




Sostenga el lector a menos de 1.5 pulgadas (4 cm) del sensor para escanearlo.

### PASO 3




El lector muestra sus lecturas de glucosa.

### Qué significan sus lecturas de glucosa

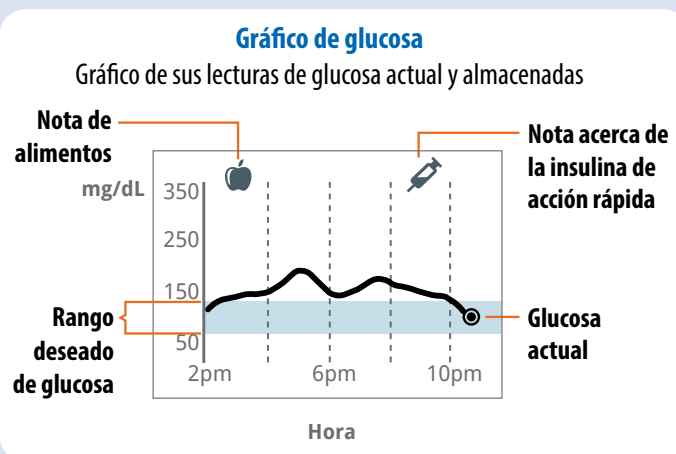


**Verificar el nivel de glucosa en sangre**  
Cuando vea este símbolo, realice una prueba de glucosa en sangre antes de tomar decisiones de tratamiento.

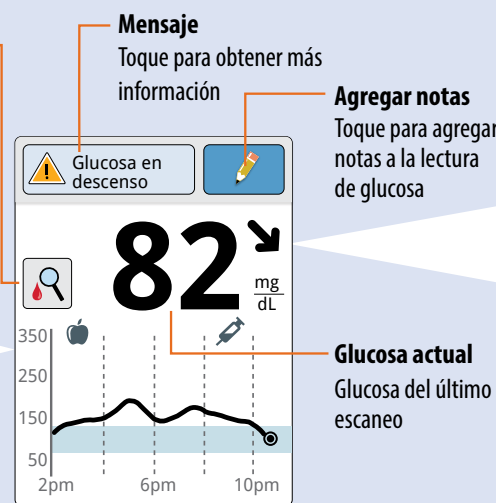

#### Flecha de tendencia de glucosa


Dirección de su glucosa

Flecha	Qué significa
↑	La glucosa está subiendo rápidamente
↗	La glucosa está subiendo
→	La glucosa está cambiando lentamente
↘	La glucosa está bajando
↓	La glucosa está bajando rápidamente

**ADVERTENCIA:** Cuando vea el símbolo , debe verificar su glucosa en sangre con un medidor de glucosa en sangre antes de tomar decisiones relacionadas con el tratamiento. Las lecturas del sensor pueden no reflejar con exactitud los niveles de glucosa en sangre.

## 4 Revise su historial

### PASO 1

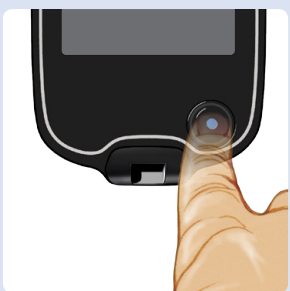

Oprima el botón de inicio para encender el lector. Oprima de nuevo el botón de inicio para ir a la pantalla inicial.




### PASO 2



Toque **Revisar historial**.

### PASO 3

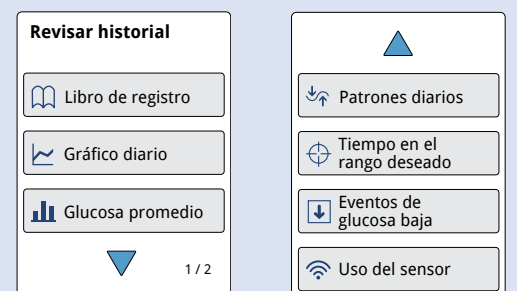

Seleccione la opción para ver.

Si siguió las instrucciones que se describen en el Manual del usuario y continúa teniendo dificultades para configurar su sistema, o si tiene síntomas que no concuerdan con su monitoreo de glucosa, comuníquese con su profesional de la salud.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. ©2018 Abbott ART39768-002 Rev. A 07/18

Consulte las instrucciones de uso

Fabricante  
Abbott Diabetes Care Inc.  
1360 South Loop Road  
Alameda, CA 94502 USA

