

Front
final facing panel when folded

4"



4"



FreeStyle Libre

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Snabbstartguide



Installationsöversikt


Se din bruksanvisning för fullständiga instruktioner och information om systemet.



1 Montera och applicera sensorn på kroppen

Förberedelse

STEG 1

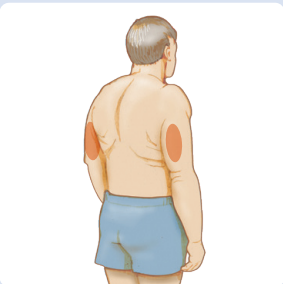


Välj en plats på överarmens baksida.
Observera: Undvik ärr, födelsemärken, hudbristningar, hudknölar och insulininjektionsställen. Växla appliceringsställe för att förhindra hudirritation. Tänk på att det ska kännas bekvämt och fungera med dina aktiviteter.

STEG 2




Tvätta stället med vanlig tvål, torka och rengör sedan med alkoholservett. Låt stället lufttorka innan du fortsätter.

STEG 3

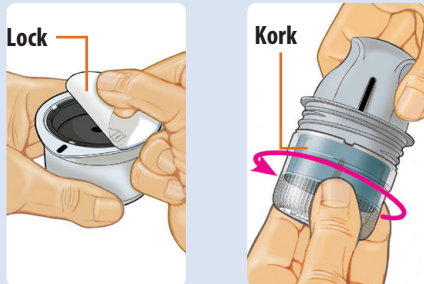


Dra av locket helt från sensorförpackningen. Skruva loss korken från sensorapplikatorn.
FÖRSIKTIG: Sensorkoderna måste matcha koderna på sensorförpackningen och sensorapplikatorn.

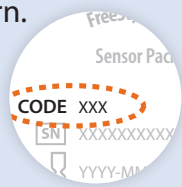

Förbereda sensorapplikatorn

STEG 4

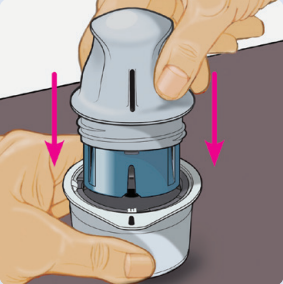

Placera den mörka markeringen på sensorapplikatorn mot den mörka markeringen på sensorförpackningen. Placera produkten på en hård yta och tryck ned sensorapplikatorn ordentligt tills det tar stopp.

STEG 5



Lyft ut sensorapplikatorn ur sensorförpackningen.


STEG 6



Sensorapplikatorn är redo att applicera sensorn.
FÖRSIKTIG: Sensorapplikatorn innehåller nu en nål. Vidrör inte sensorapplikatorns insida och sätt inte tillbaka den i sensorförpackningen.


Applicera sensorn

STEG 7

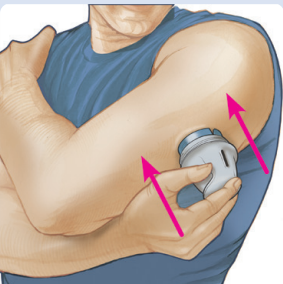


Placera sensorapplikatorn över stället och tryck ned ordentligt för att applicera sensorn.
FÖRSIKTIG: Tryck inte ned sensorapplikatorn förrän den placerats över ett förberett ställe för att förhindra oavsiktliga resultat eller skada.

STEG 8

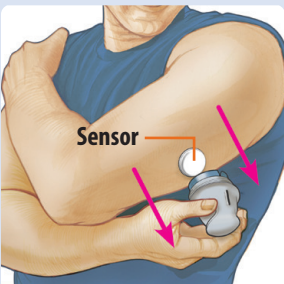

Dra försiktigt bort sensorapplikatorn från kroppen.

STEG 9

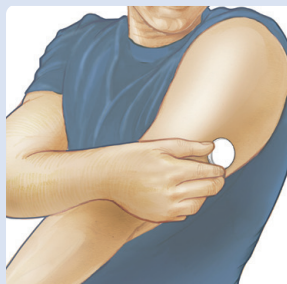

Kontrollera att sensorn sitter säkert.
Kassera den använda sensorförpackningen och sensorapplikatorn. Se *Kassering* i bruksanvisningen.



