

Front
final facing panel when folded

4"

4"



FreeStyle Libre

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEEM


4,5"

Snelstartgids



Overzicht instelling


Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de volledige instructies en informatie voor het systeem.

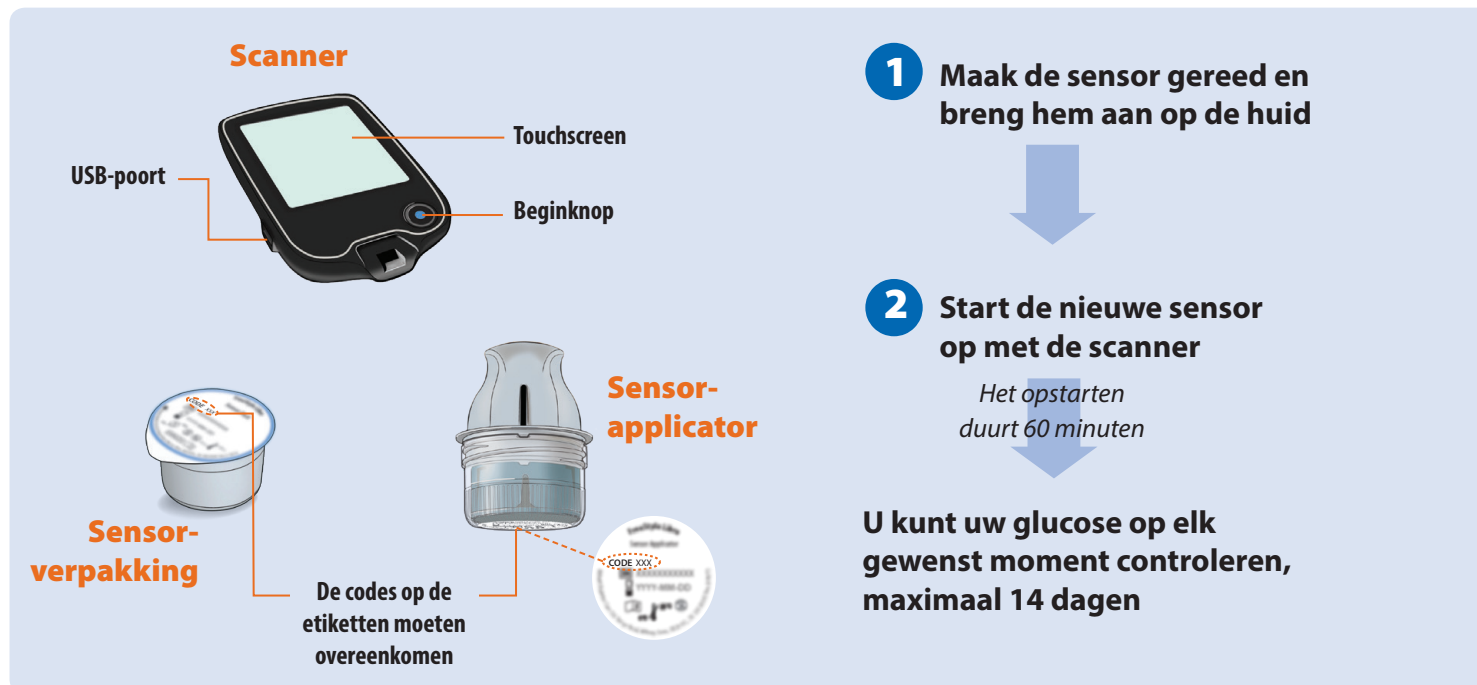

1 Maak de sensor gereed en breng hem aan op de huid

Vorbereiden

STAP 1

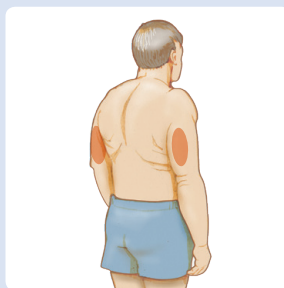

Kies een plek op de achterkant van uw bovenarm.


Opmerking: Vermijd littekens, moedervlekken, striemen, bulten en injectieplaatsen voor insuline. Wissel van plek bij het aanbrengen van een nieuwe sensor om huidirritatie te voorkomen. Houd rekening met uw comfort en activiteiten.

STAP 2




Was de plek met gewone zeep, droog de plek af en reinig de plek vervolgens met een alcoholdoekje. Laat de plaats voordat u verdergaat aan de lucht drogen.

STAP 3

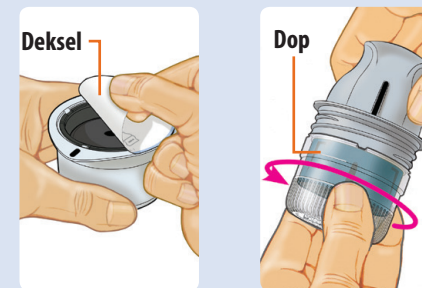


Trek het deksel helemaal van de sensorverpakking af. Draai de dop van de sensorapplicator.

LET OP: De sensorcodes op de sensorverpakking en de sensorapplicator moeten overeenkomen.

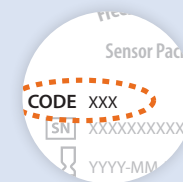


De sensorapplicator gereedmaken

STAP 4

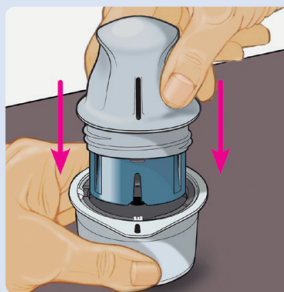

Plaats de donkere markering op de sensorapplicator tegenover de donkere markering op de sensorverpakking. Druk, met de sensorverpakking op een harde ondergrond, de sensorapplicator stevig naar beneden tot hij niet verder kan.

STAP 5

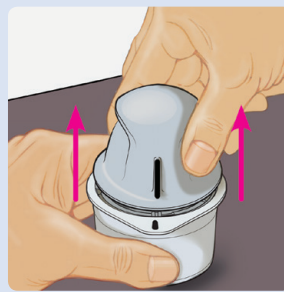

Haal de sensorapplicator uit de sensorverpakking.

STAP 6




De sensorapplicator is gereed om de sensor aan te brengen.

LET OP: De sensorapplicator bevat nu een naald. Raak de binnenkant van de sensorapplicator niet aan en plaats hem niet terug in de sensorverpakking.

De sensor aanbrengen


STAP 7

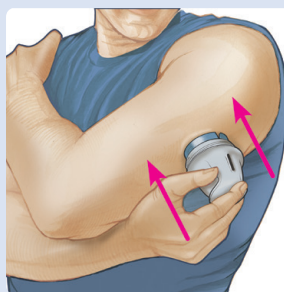

Plaats de sensorapplicator op de voorbereide plek en druk hem stevig in om de sensor aan te brengen.


LET OP: Druk de sensorapplicator niet in voordat die op de voorbereide plek is geplaatst, ter voorkoming van onbedoelde resultaten of letsel.

STAP 8

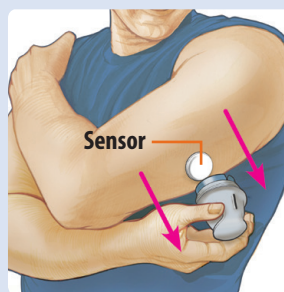

Trek de sensorapplicator voorzichtig terug.

STAP 9

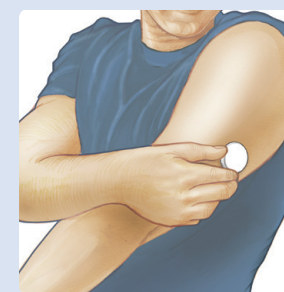

Controleer of de sensor goed vastzit op de huid. Voer de gebruikte sensorverpakking en sensorapplicator af. Zie paragraaf *Afvoer* in de gebruikershandleiding.



2 Start de nieuwe sensor op met de scanner


STAP 1



Druk op de beginknop om de scanner aan te zetten.

Opmerking: Als u de scanner voor de eerste keer gebruikt, volg dan de aanwijzingen op om de datum, tijd en het glucosedoelbereik in te stellen.

STAP 2

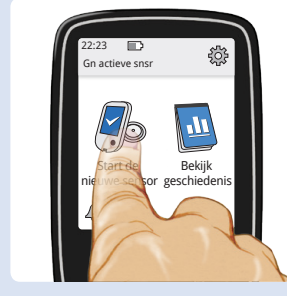

Raak **Start de nieuwe sensor** aan.

STAP 3




Houd de scanner binnen een afstand van 4 cm (1,5 inch) tot de sensor om de sensor te scannen.

De sensor kan na 60 minuten worden gebruikt voor de controle van uw glucose.



3 Controleer uw glucose

STAP 1

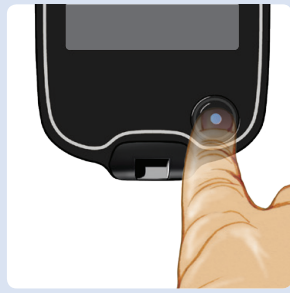


Druk op de beginknop om de scanner aan te zetten.

STAP 2



Houd de scanner binnen een afstand van 4 cm (1,5 inch) tot de sensor om de sensor te scannen.

STAP 3

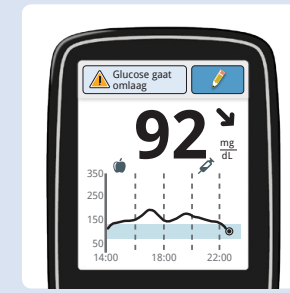


De scanner geeft uw glucosemetingen weer.

Inzicht in uw glucosewaarden


Glucosegrafiek

Grafiek van uw huidige en opgeslagen glucosemetingen

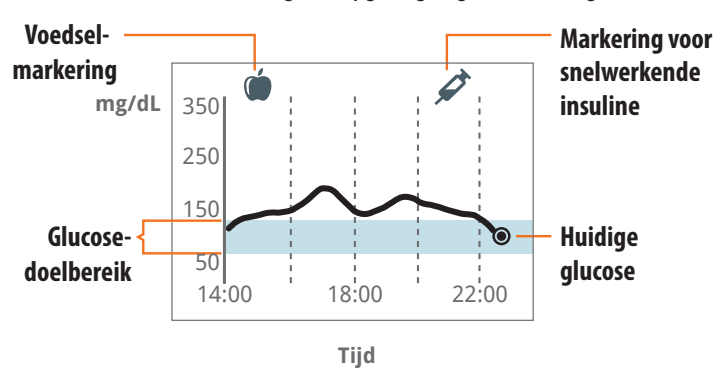

Bericht

Aanraken voor meer informatie

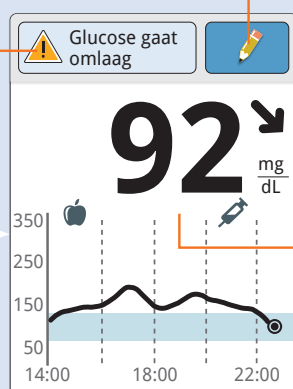

Notities toevoegen
Aanraken om notities toe te voegen aan de glucosemeting

Huidige glucose
Glucose van uw laatste scan

Glucosetrendpijl

De richting die uw glucose opgaat

Pijl	Wat het betekent
↑	Glucose stijgt snel
↗	Glucose stijgt
→	Glucose langzaam aan het veranderen
↘	Glucose daalt
↓	Glucose daalt snel

4 Geschiedenis bekijken


STAP 1



Druk op de beginknop om de scanner aan te zetten. Druk nogmaals op de beginknop om naar het beginscherm te gaan.



STAP 2

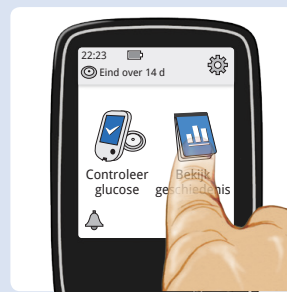

Raak **Bekijk geschiedenis** aan.

STAP 3



Selecteer de optie voor weergave.

Als u de instructies hebt opgevolgd die in de gebruikershandleiding worden beschreven en u nog steeds problemen hebt met het instellen van uw systeem of als u klachten krijgt die niet passen bij de gevonden glucosewaarden, neem dan contact op met uw behandelaar.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. ©2019 Abbott. ART41055-011 Rev. A 11/19

EC REP

Abbott B.V.
Weglaan 5, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands

CE 2797

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

Abbott