



FreeStyle Libre 2

FLASH -GLUKOOSIN SEURANTAJÄRJESTELMÄ

Pikaopas



Käyttöönoton yleiskatsaus

Täydelliset järjestelmän ohjeet ja tiedot ovat käyttäjän ohjekirjassa.

Lukulaite

USB-portti

Kosketusnäyttö

Koti-painike

Sensoripakkaus

Sensorin asetin

Etikettien koodien on täsmättävä

1 Kokoa sensori ja aseta se iholle

↓

2 Aloita uusi sensori lukulaitteessa

Odota 60 minuuttia, kunnes järjestelmä käynnistyy

↓

3 Tarkista glukoosisi milloin tahansa haluat enintään 14 päivän ajan

1 Kokoa sensori ja aseta se iholle

Valmistautuminen

VAIHE 1




Valitse kohta käsivarren takaosasta.
Huomautus: Vältä arpia, luomia, raskausarpia, kyhmyjä ja insuliinin pistoskohtia. Vaihtele kohtia käyttökertojen välillä ihoärsytyksen estämiseksi. Ota huomioon käyttömukavuus ja harrastamasi liikunta.

VAIHE 2



Pese kohta tavallisella saippualla, kuivaa ja puhdista sitten alkoholipyyhkeellä. Anna kohdan kuivua, ennen kuin jatkat.

VAIHE 3

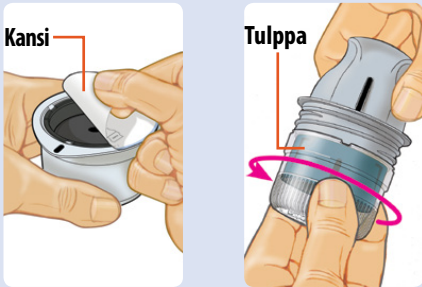


Vedä kansi kokonaan irti sensoripakkauksesta. Kierrä tulppa irti sensorin asettimesta.
HUOMIO: sensorikoodin täytyy olla sama sekä sensoripakkauksessa että sensorin asettimessa.



Sensorin asettimen valmistelu

VAIHE 4

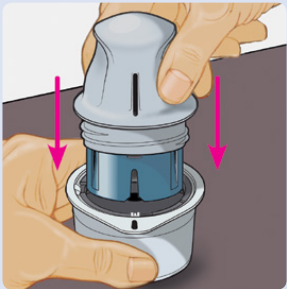

Kohdista sensorin asettimen musta merkki sensoripakkauksen mustaan merkkiin. Paina sensorin asetinta lujasti alaspäin kovalla pinnalla, kunnes se ei enää liiku.

VAIHE 5



Nosta sensorin asetin pois sensoripakkauksesta.


VAIHE 6



Sensorin asetin on valmis sensorin asettamista varten.
HUOMIO: Sensorin asetin sisältää nyt neulan. Sensorin asettimen sisäpuolta ei saa koskettaa eikä sitä saa asettaa takaisin sensoripakkaukseen.


Aseta sensori

VAIHE 7

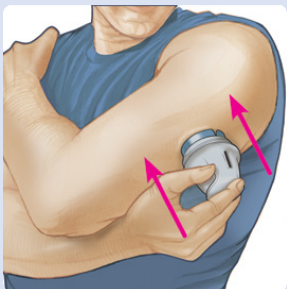

Aseta sensorin asetin kohdan päälle ja aseta sensori painamalla asetinta lujasti alaspäin.
HUOMIO: sensorin asetinta ei saa painaa, ennen kuin se on asetettu valmistellun kohdan päälle, jotta et saa tahattomia tuloksia tai aiheuta vammaa.

VAIHE 8

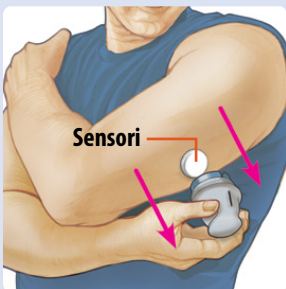

Vedä sensorin asetin varovasti irti iholta.

VAIHE 9




Varmista, että sensori on kunnolla kiinni.
Hävitä käytetty sensoripakkaus ja sensorin asetin. Katso käyttäjän ohjekirjan kohta Hävittäminen.



2 Aloita uusi sensori lukulaitteessa

VAIHE 1

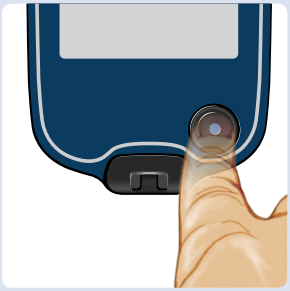

Käynnistä lukulaite painamalla Koti-painiketta.

Huomautus: jos käytät lukulaitetta ensimmäistä kertaa, noudata päivämäärän ja ajan asettamista koskevia kehoitteita.

VAIHE 2




Valitse **Aloita uusi sensori**.

VAIHE 3



Pidä lukulaite enintään 4 cm:n (1,5 tuuman) päässä sensorista skannauksen.

Sensoria voidaan käyttää glukoosin tarkistukseen 60 minuutin jälkeen.

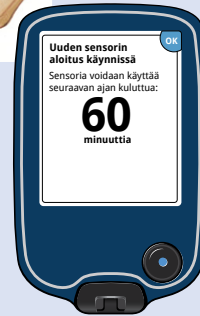

3 Tarkasta glukoosi

VAIHE 1



Käynnistä lukulaite painamalla Koti-painiketta.

VAIHE 2




Pidä lukulaite enintään 4 cm:n (1,5 tuuman) päässä sensorista skannauksen aikana.

VAIHE 3

Viesti
Saat lisätietoa tätä koskettamalla

Nykyinen glukoosi
Viimeisimmän skannauksen glukoosi

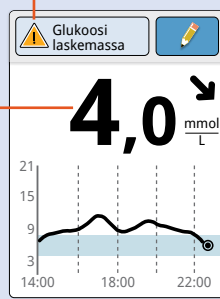

Glukoosin suuntanuoli	Mitä se tarkoittaa
↑	Glukoosi nousee nopeasti
↗	Glukoosi nousee
→	Glukoosi muuttuu hitaasti
↘	Glukoosi laskee
↓	Glukoosi laskee nopeasti

Lukulaite näyttää glukoosilukemasi. Näitä ovat Nykyinen glukoosi, Glukoosin suuntanuoli ja glukoosikuvaaja.

Hälytysten asettaminen


Sensori on automaattisesti tietoyhteydessä lukulaitteen kanssa ja voi antaa glukoosihälytyksiä, jos päätät kytkeä ne **PÄÄLLE**. Hälytykset ovat **POIS** päältä oletusasetuksena. Kytke hälytykset **PÄÄLLE** tai muuta niiden asetuksia noudattamalla seuraavia vaiheita.

VAIHE 1




Siirry oletusnäyttöön painamalla Koti-painiketta. Valitse **⚙️**.

VAIHE 2

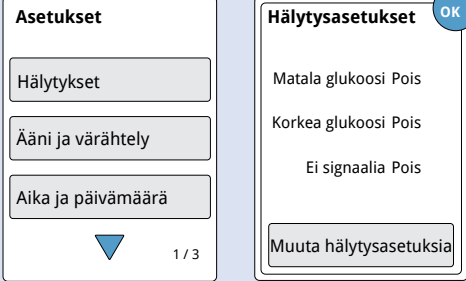

Valitse **Hälytykset** ja sen jälkeen **Muuta hälytysasetuksia**.

VAIHE 3

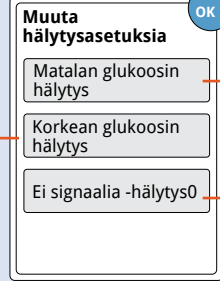

Antaa ilmoituksen, kun glukoosi on asettamasi tason yläpuolella.

Antaa ilmoituksen, kun glukoosi on asettamasi tason alapuolella.

Antaa ilmoituksen, kun sensori ei ole yhteydessä lukulaitteeseen etkä saa matalan tai korkean glukoosin hälytyksiä.


Valitse ja aseta hälytykset. Tallenna valitsemalla **valmis**.
Huomautus: Ei signaalia -hälytys kytkeytyy myös päälle automaattisesti, kun kytket alhaisen tai korkean glukoosin hälytyksen päälle ensimmäistä kertaa. Kytke se pois päältä valitsemalla **Ei signaalia -hälytys**.

Hälytysten käyttäminen

Sensori on skannattava, jotta voit nähdä glukoosilukemasi.



Valitse **Sivuuta hälytys ja tarkasta glukoosi** tai sivuuta hälytys ja tarkasta glukoosisi painamalla Koti-painiketta.

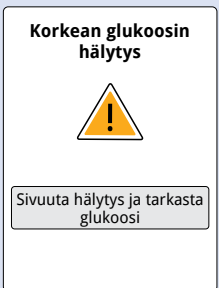

Sivuuta hälytys valitsemalla **Ei**.
Valitse **Kyllä** tai paina aloituspainiketta, jos haluat sivuuttaa hälytyksen ja skannata sensorin.



Kun hälytys on **PÄÄLLÄ**, ääni/värähtely ja signaalin tila näytetään oletusnäytössä.

Symboli	Mitä se tarkoittaa
🔊	Ääni ja värähtely PÄÄLLÄ
🔊❌	Ääni ja värähtely POIS
(••)	Sensori tiedonsiirtoyhteydessä lukulaitteen kanssa
❌(••)	Sensori ei tiedonsiirtoyhteydessä lukulaitteen kanssa

Lisäsymboleja on käyttäjän ohjekirjassa

Jos olet noudattanut käyttäjän ohjekirjassa annettuja ohjeita ja sinulla on edelleen ongelmia järjestelmän käyttöönotossa tai jos sinulla on oireita, jotka eivät täsmää glukoosin seurannan kanssa, ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions.
©2019 Abbott ART41106-011 Rev. A 10/19

EC REP

Abbott B.V.
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands

i

CE
2797

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

Abbott