



# FreeStyle Libre 2

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEEM

## Snelle opstartgids



## Overzicht instelling

Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de volledige instructies en informatie voor het systeem.

**Scanner**  
USB-poort, Touchscreen, Beginknop

**Sensor-verpakking**  
De codes op de etiketten moeten overeenkomen


**Sensor-applicator**

- 1 Maak de sensor gereed en breng hem aan op de huid**
- 2 Start de nieuwe sensor op met de scanner**  
*Het opstarten duurt 60 minuten*
- 3 Controleer uw glucose op elk gewenst moment, maximaal 14 dagen**

## 1 Maak de sensor gereed en breng hem aan op de huid

### Vorbereiden

### STAP 1

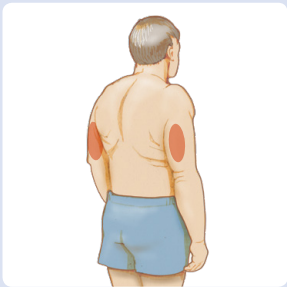

Kies een plek op de achterkant van uw bovenarm.


**Opmerking:** Vermijd littekens, moedervlekken, striemen, bulten en injectieplaatsen voor insuline. Wissel van plek bij het aanbrengen van een nieuwe sensor om huidirritatie te voorkomen. Houd rekening met uw comfort en activiteiten.

### STAP 2



Was de plek met gewone zeep, droog de plek af en reinig de plek vervolgens met een alcoholdoekje. Laat de plaats voordat u verdergaat aan de lucht drogen.

### STAP 3

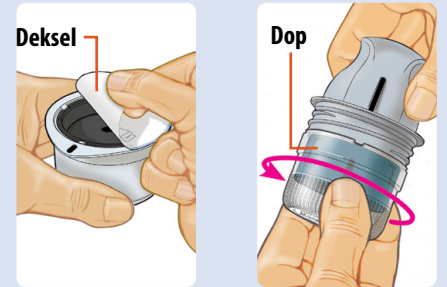


Trek het deksel helemaal van de sensorverpakking af. Draai de dop van de sensorapplicator.

**LET OP:** De sensorcodes op de sensorverpakking en de sensorapplicator moeten overeenkomen.




### De sensorapplicator gereedmaken

### STAP 4

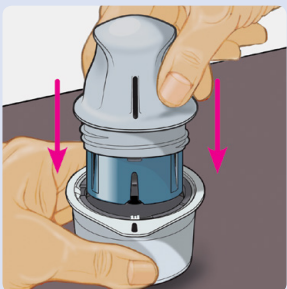

Plaats de donkere markering op de sensorapplicator tegenover de donkere markering op de sensorverpakking. Druk, met de sensorverpakking op een harde ondergrond, de sensorapplicator stevig naar beneden tot hij niet verder kan.

### STAP 5

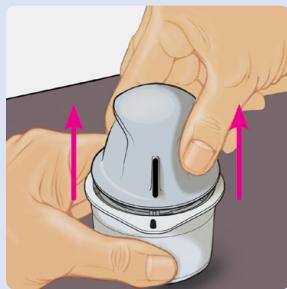

Haal de sensorapplicator uit de sensorverpakking.

### STAP 6




De sensorapplicator is gereed om de sensor aan te brengen.

**LET OP:** De sensorapplicator bevat nu een naald. Raak de binnenkant van de sensorapplicator niet aan en plaats hem niet terug in de sensorverpakking.

### De sensor aanbrengen


### STAP 7

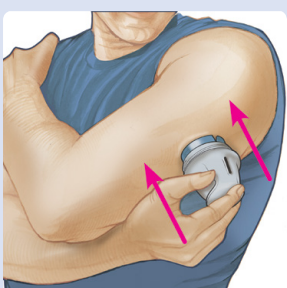

Plaats de sensorapplicator op de voorbereide plek en druk hem stevig in om de sensor aan te brengen.


**LET OP:** Druk de sensorapplicator niet in voordat die op de voorbereide plek is geplaatst, ter voorkoming van onbedoelde resultaten of letsel.

### STAP 8

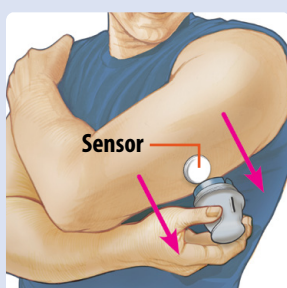

Trek de sensorapplicator voorzichtig terug.

### STAP 9

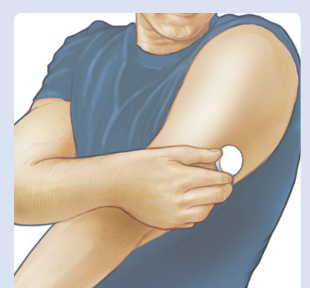


Controleer of de sensor goed vastzit op de huid. Voer de gebruikte sensorverpakking en sensorapplicator af. Zie paragraaf Afvoer in de gebruikershandleiding.



## 2 Start de nieuwe sensor op met de scanner


### STAP 1

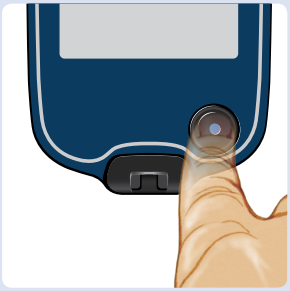

Druk op de beginknop om de scanner aan te zetten.

**Opmerking:** Als u de scanner voor de eerste keer gebruikt, volg dan de aanwijzingen op om de datum en tijd in te stellen.

### STAP 2

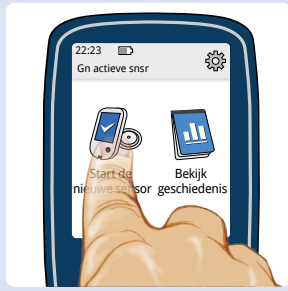

Raak **Start de nieuwe sensor** aan.

### STAP 3




Houd de scanner binnen een afstand van 4 cm (1,5 inch) tot de sensor om de sensor te scannen.

De sensor kan na 60 minuten worden gebruikt voor de controle van uw glucose.



## 3 Controleer uw glucose

### STAP 1

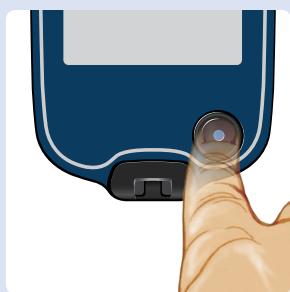

Druk op de beginknop om de scanner aan te zetten.

### STAP 2




Houd de scanner binnen een afstand van 4 cm (1,5 inch) tot de sensor om de sensor te scannen.

### STAP 3

**Bericht**  
Raak aan voor meer informatie

**Huidige glucose**  
Glucose van de laatste scan

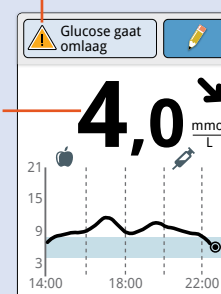


Glucose-trendpijl	Wat het betekent
↑	Glucose stijgt snel
↗	Glucose stijgt
→	Glucose langzaam aan het veranderen
↘	Glucose daalt
↓	Glucose daalt snel

De scanner geeft uw glucosemeting weer. Inclusief uw huidige glucose, de glucosetrendpijl en de glucosegrafiek.

## Alarmen instellen


De sensor communiceert automatisch met de scanner en kan glucosealarmen afgeven als u die functie op **AAN** zet. De standaardinstelling voor deze alarmen is **UIT**. Volg de onderstaande stappen om de alarmen **AAN** te zetten of de instellingen ervan te wijzigen.

### STAP 1

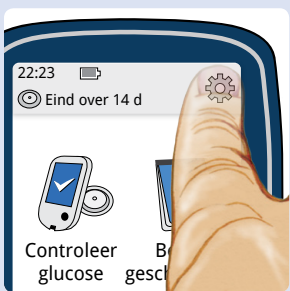


Druk op de beginknop om naar het beginscherm te gaan. Raak aan.

### STAP 2

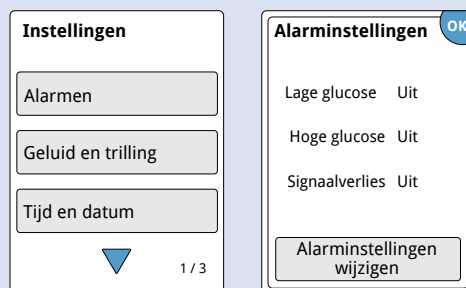

Raak **Alarmen** aan en raak vervolgens **Alarminstellingen wijzigen** aan.

### STAP 3

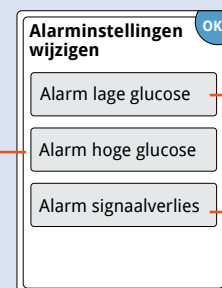

Maakt u er opmerkzaam op wanneer uw glucose hoger is dan de door u ingestelde waarde.

Selecteer uw alarmen en stel die in. Raak **gereed** aan om de instellingen op te slaan.



**Opmerking:** Als u het alarm voor een lage of hoge glucosewaarde voor het eerst inschakelt, wordt het alarm voor signaalverlies daarbij automatisch ingeschakeld. Raak **Alarm signaalverlies** aan om het uit te zetten.

Maakt u er opmerkzaam op wanneer uw glucose lager is dan de door u ingestelde waarde.

Maakt u er opmerkzaam op wanneer de sensor niet communiceert met de scanner, waardoor er bij lage en hoge glucosewaarden geen alarmen worden afgegeven.

## Alarmen gebruiken

U moet de sensor scannen om de glucosemeting te zien.

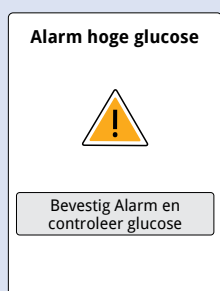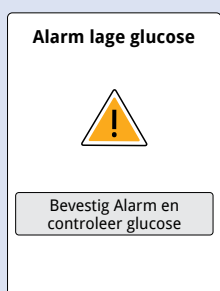

Raak **Bevestig Alarm en controleer glucose** aan of druk op de beginknop om het alarm te bevestigen en uw glucosewaarde te controleren.

Raak **Nee** aan om het alarm te bevestigen.

Raak **Ja** aan of druk op de beginknop om het alarm te bevestigen en de sensor te scannen.



Wanneer een alarm **AAN** staat, worden geluid/trilling en signaalstatus weergegeven op het beginscherm.

Symbol	Wat het betekent
	Geluid en trilling <b>AAN</b>
	Geluid en trilling <b>UIT</b>
	Sensor communiceert met scanner
	Sensor communiceert niet met scanner

Zie de gebruikershandleiding voor aanvullende symbolen.

Als u de instructies hebt opgevolgd die in de gebruikershandleiding worden beschreven en u nog steeds problemen hebt met het instellen van uw systeem of als u klachten krijgt die niet passen bij de gevonden glucosewaarden, neem dan contact op met uw behandelaar.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. ©2020 Abbott ART41106-018 Rev. A 01/20

EC REP Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp, The Netherlands

CE 2797

Abbott Diabetes Care Ltd. Range Road, Witney, Oxon OX29 0YL, UK

