



FreeStyle Libre 2

FLASHGLUKOSEMONITORERINGSSYSTEM

Lommeuide



Overblik over opsætning


Du kan finde udførlige vejledninger og oplysninger om systemet i brugervejledningen.

- 1 Saml sensoren, og sæt den på kroppen**
- 2 Start den nye sensor med læseren**
Vent 60 minutter, mens den starter
- 3 Du kan måle din glukose når som helst i op til 14 dage**

1 Saml sensoren, og sæt den på kroppen

Gør dig klar

TRIN 1

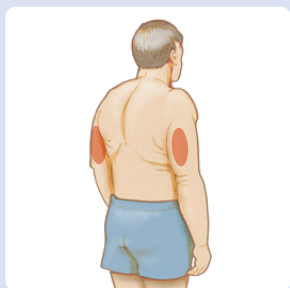

Vælg et sted på bagsiden af din overarm.


Bemærk: Undgå steder med ar, modermærker, strækmærker, buler og steder, hvor du indsprøjter insulin. Skift mellem påsætningssteder, så du undgår hudirritation. Overvej komfort og aktiviteter.

TRIN 2



Vask stedet med almindelig sæbe, tør det, og rens det derefter med en spritafrenser. Lad stedet lufttørre, inden du fortsætter.

TRIN 3

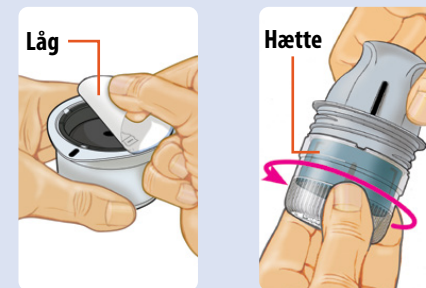


Træk låget helt af sensorpakken. Skru hættens af sensorapplikatoren.

FORSIGTIG: Sensorkoderne skal være identiske på sensorpakken og sensorapplikatoren.




Klargør sensorapplikatoren

TRIN 4

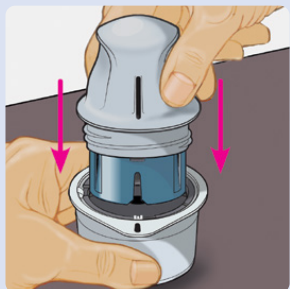

Bring det mørke mærke på sensorapplikatoren på linje med det mørke mærke på sensorpakken. Tryk ned på sensorapplikatoren med et fast tryk på en hård overflade, indtil den stopper.

TRIN 5

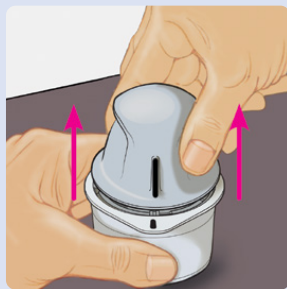

Løft sensorapplikatoren ud af sensorpakken.

TRIN 6




Sensorapplikatoren er klar til at sætte sensoren på.

FORSIGTIG: Sensorapplikatoren indeholder nu en nål. Du må ikke røre ved indersiden af sensorapplikatoren eller lægge den tilbage i sensorpakken.

Sæt sensoren på


TRIN 7

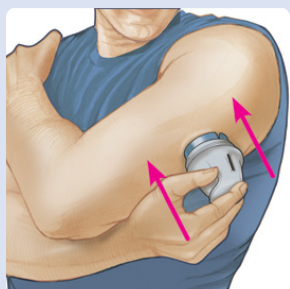

Anbring sensorapplikatoren over stedet, og tryk ned med et fast tryk for at sætte sensoren på.

FORSIGTIG: Du må ikke trykke ned på sensorapplikatoren, før den er placeret over det klargjorte sted, for at forhindre utilsigtede resultater eller personskaade.

TRIN 8

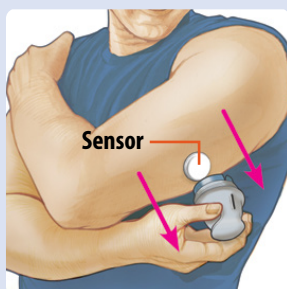

Træk forsigtigt sensorapplikatoren væk fra kroppen.

TRIN 9



Sørg for, at sensoren sidder godt fast.

Kasser den brugte sensorpakke og sensorapplikator. Se afsnittet *Bortskaffelse* i brugervejledningen.



2 Start den nye sensor med læseren

TRIN 1



Tryk på Hjem-knappen for at tænde læseren.

Bemærk: Hvis det er første gang, du bruger læseren, skal du følge meddelelserne på skærmen for at indstille dato og tidspunkt.

TRIN 2



Tryk på **Start ny sensor**.

TRIN 3



Hold læseren højest 4 cm (1,5 tommer) fra sensoren for at scanne den.

Sensoren kan bruges til at tjekke din glukose efter 60 minutter.



3 Tjek din glukose

TRIN 1



Tryk på Hjem-knappen for at tænde læseren.

TRIN 2




Hold læseren højest 4 cm (1,5 tommer) fra sensoren for at scanne den.

Meddelelse

Tryk her for at få flere oplysninger

Aktuelt glukoseniveau
Glukoseniveauet fra din seneste scanning

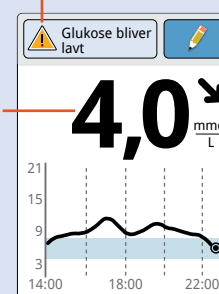

TRIN 3

Glukosetendenspil	Hvad det betyder
↑	Glukose stiger hurtigt
↗	Glukose stiger
→	Glukose ændrer sig langsomt
↘	Glukose falder
↓	Glukose falder hurtigt

Læseren viser din glukosemåling. Dette omfatter dit aktuelle glukoseniveau, din glukosetendenspil og din glukosekurve.

Sådan indstilles alarmer


Sensoren kommunikerer automatisk med læseren og kan give dig glukosealarmer, hvis du vælger at slå dem **TIL**. Alarmer er som standard slået **FRA**. For at slå alarmer **TIL** eller redigere deres indstillinger skal du følge disse trin.

TRIN 1




Tryk på Hjem-knappen for at gå til Start-skærbilledet. Tryk på .

TRIN 2

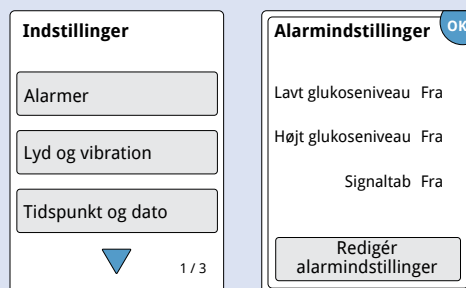

Tryk på **Alarmer**, og tryk derefter på **Redigér alarmindstillinger**.

TRIN 3

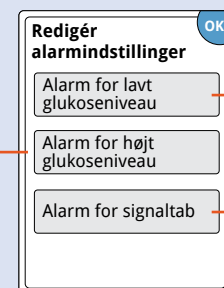

Giver dig besked, når glukoseniveauet er over det niveau, du indstiller.


Giver dig besked, når glukoseniveauet er under det niveau, du indstiller.

Giver dig besked, når sensoren ikke kommunikerer med læseren, og om at du ikke vil modtage alarmer for lavt eller højt glukoseniveau.

Vælg og indstil dine alarmer. Tryk på **udført** for at gemme. **Bemærk:** Første gang du slår alarmen for højt eller lavt glukoseniveau, bliver Alarm for signaltab også automatisk slået til. Tryk på **Alarm for signaltab** for at slå den fra.

Sådan bruges alarmer


Du skal scanne din sensor for at se din glukosemåling.

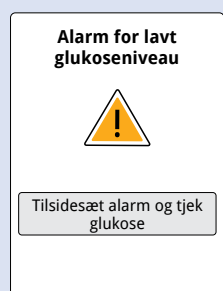

Tryk på **Tilsidesæt alarm og tjek glukose**, eller tryk på Hjem-knappen for at tilsidesætte alarmen og tjekke din glukose.



Tryk på **Tilsidesæt alarm og tjek glukose**, eller tryk på Hjem-knappen for at tilsidesætte alarmen og scanne sensoren.

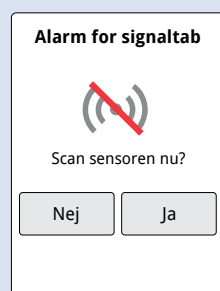

Tryk på **Nej** for at tilsidesætte alarmen. Tryk på **Ja**, eller tryk på Hjem-knappen for at tilsidesætte alarmen og scanne sensoren.



Når en alarm er slået **TIL**, vises Lyd og vibration samt signalstatus på Start-skærbilledet.

Symbol	Betydning
	Lyd og vibration slået TIL
	Lyd og vibration slået FRA
	Sensoren kommunikerer med læseren
	Sensoren kommunikerer ikke med læseren

Se yderligere symboler i brugervejledningen.