

CONSEJOS PARA NIÑOS



FreeStyle
Libre 2

Recuerda estas cosas importantes:



El sensor tiene que ir en la parte posterior superior de mi brazo.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor cuando veo  durante las primeras 12 horas de uso de un sensor.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor si creo que el número no coincide con cómo me siento.



Si tomo insulina para una comida, no debo tomar más insulina durante 2 horas. Necesito esperar y mirar.




Advertencia

La aplicación solo debe usarse para escanear su sensor. Si se usa la aplicación para escanear el sensor de otra persona, los datos de glucosa pueden confundirse.

¡Importante!

No tomes más de 500 mg de suplementos de vitamina C por día. Esto puede afectar las lecturas de tu sensor. Algunos suplementos como Airborne® y Emergen-C® contienen más de 500 mg de vitamina C.

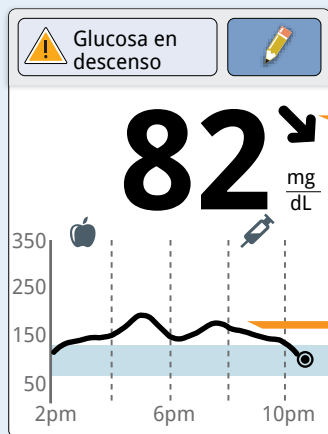

Mi lector

Esta flecha me muestra hacia dónde va mi glucosa

Mi glucosa es el resultado de las últimas 8 horas



Mi teléfono