

# CONSEJOS PARA NIÑOS



FreeStyle  
Libre 2

Recuerda estas cosas importantes:



El sensor tiene que ir en la parte posterior superior de mi brazo.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor cuando veo  durante las primeras 12 horas de uso de un sensor.



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor si creo que el número no coincide con cómo me siento.



Si tomo insulina para una comida, no debo tomar más insulina durante 2 horas. Necesito esperar y mirar.




## ¡Advertencia!

La aplicación solo debe usarse para escanear su sensor. Si se usa la aplicación para escanear el sensor de otra persona, los datos de glucosa pueden confundirse.

## ¡Importante!


- Mientras uses un sensor FreeStyle Libre 2, no tomes más de 500 mg de vitamina C por día.
- Mientras uses un sensor FreeStyle Libre 2 Plus, no tomes más de 1000 mg de vitamina C por día.
- Tomar más de estos niveles puede afectar las lecturas del sensor. Algunos suplementos como Airborne® y Emergen-C® contienen 1000 mg de vitamina C.

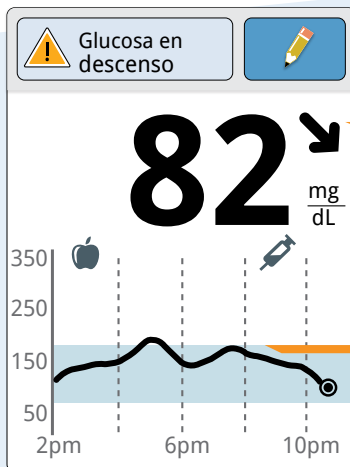

Mi lector

Esta flecha me muestra hacia dónde va mi glucosa

Mis resultados de glucosa de las últimas 8 horas

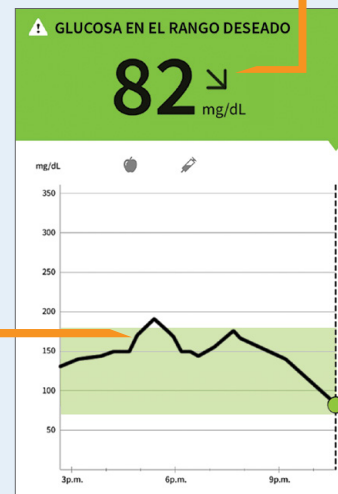

Mi teléfono