

Guía de inicio rápido para el lector


Para uso con el sensor FreeStyle Libre 3 y el sensor FreeStyle Libre 3 Plus



Resumen de configuración

Consulte su Manual del usuario para obtener instrucciones e información completas del sistema.

Lector

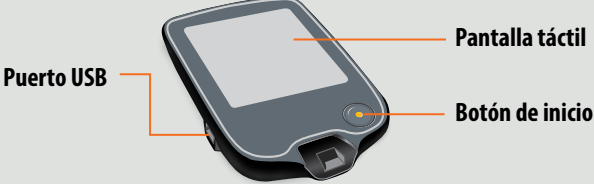

Puerto USB

Pantalla táctil

Botón de inicio



Aplicador del sensor

1


Aplique el sensor en la parte posterior del brazo



2

Use el lector para iniciar el sensor

Espera 60 minutos para que se inicie

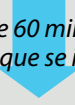

3

Después del período inicial, puede usar el lector para verificar su glucosa

1 Aplique el sensor en la parte posterior del brazo

Prepárese

PASO 1




Seleccione un sitio en la parte posterior del brazo. No use otros sitios ya que estos no están aprobados y pueden generar lecturas de glucosa inexactas.
Nota: Evite las cicatrices, lunares, estrías, bultos y lugares de inyección de insulina. Para evitar irritación en la piel, cambie de sitio entre aplicaciones.

PASO 2



Lave el sitio con un jabón corriente, séquelo y luego límpielo con una toallita humedecida con alcohol. Deje que el sitio se seque al aire antes de continuar.

PASO 3

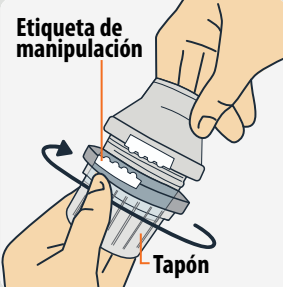

Desenrosque el tapón del aplicador del sensor.
PRECAUCIÓN:

- NO lo use si está dañado o si la etiqueta de manipulación indica que el aplicador del sensor ya se ha abierto.
- NO vuelva a poner el tapón, ya que podría dañar el sensor.
- NO toque el interior del aplicador del sensor, ya que contiene una aguja.


Aplique el sensor

PASO 4



Coloque el aplicador del sensor sobre el lugar y empuje hacia abajo con firmeza para aplicarse el sensor.
PRECAUCIÓN: Para evitar resultados imprevistos o lesiones, no presione hacia abajo el aplicador del sensor hasta que esté colocado encima del sitio preparado.

PASO 5

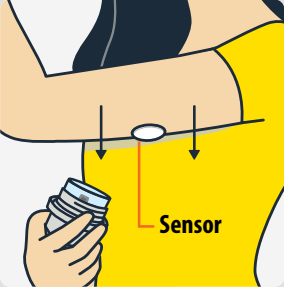

Retire suavemente el aplicador del sensor del cuerpo.

PASO 6



Asegúrese de que el sensor esté firmemente colocado. Coloque de nuevo el tapón en el aplicador del sensor. Deseche el aplicador del sensor de acuerdo con las regulaciones locales.


2 Use el lector para iniciar el sensor nuevo

PASO 1



Oprima el botón de inicio para encender el lector. Si está usando el lector por primera vez, siga las indicaciones para configurar el lector. Luego, toque **Iniciar nuevo sensor** cuando vea esta pantalla.

PASO 2

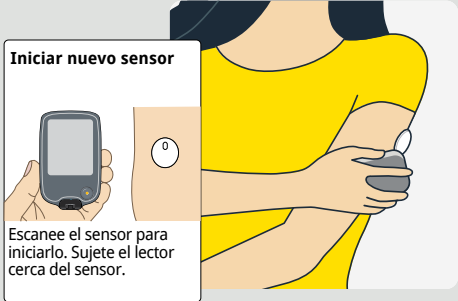

Acerque el lector al sensor para ponerlo en marcha. Es posible que deba mover el lector lentamente hasta que encuentre el punto justo.
Nota: Antes de iniciar su sensor, elija qué dispositivo desea utilizar. Si inicia el sensor con el lector, no podrá usar la aplicación para controlar su glucosa o recibir alarmas.


PASO 3



Lea la información importante que aparece en la pantalla. El lector mostrará automáticamente su lectura de glucosa después de 60 minutos.

3 Verifique su glucosa


PASO 1

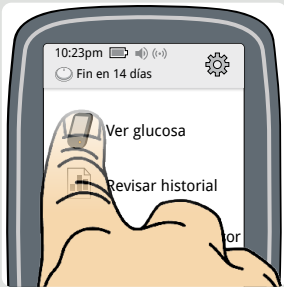

Oprima el botón de inicio para encender el lector y toque **Ver glucosa** desde la pantalla de inicio.

Nota: El lector obtiene lecturas de glucosa automáticamente cuando se encuentra a menos de 33 pies del sensor.

PASO 2

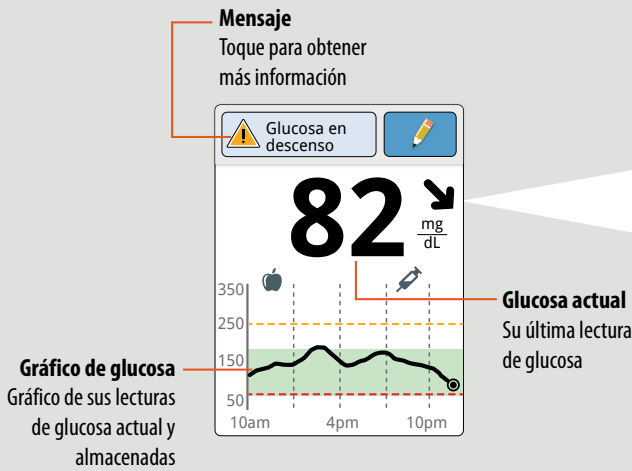

Flecha de tendencia de glucosa Dirección de su glucosa	
Flecha	Qué significa
↑	La glucosa está subiendo rápidamente
↗	La glucosa está subiendo
→	La glucosa está cambiando lentamente
↘	La glucosa está bajando
↓	La glucosa está bajando rápidamente

El lector muestra su lectura de glucosa. Esto incluye su glucosa actual, la flecha de tendencia de glucosa y el gráfico de glucosa.

Configuración de las alarmas

El sensor se comunica automáticamente con el lector y puede proporcionarle alarmas de glucosa. Las alarmas están activadas de forma predeterminada. Para cambiar su configuración o desactivar las alarmas, siga estos pasos.


IMPORTANTE: Las alarmas de glucosa son una función de seguridad importante. Por favor, consulte a su profesional de la salud antes de realizar cambios.

PASO 1




Oprima el botón de inicio para ir a la pantalla de inicio. Toque .

PASO 2

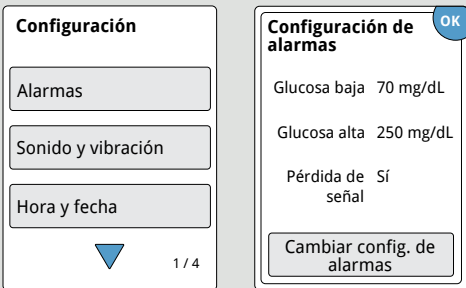


Toque **Alarmas** y, a continuación, toque **Cambiar config. de alarmas**.

PASO 3

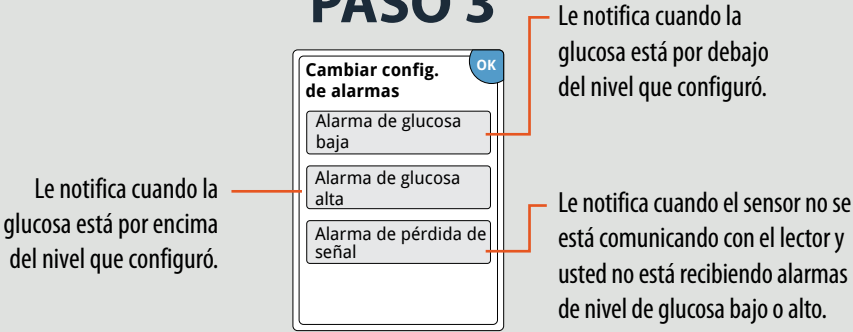


Seleccione y configure sus alarmas. Toque **listo** para guardar.

Utilización de las alarmas

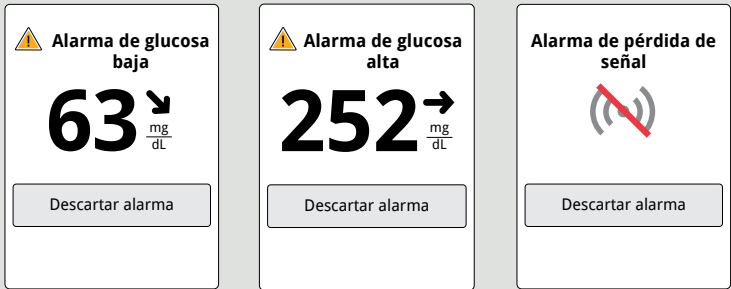

Toque **Descartar alarma** u oprima el botón de inicio para descartar la alarma.

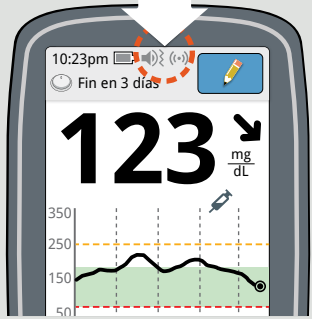


Pantalla de sonido/vibración y de estado de la señal en la pantalla de inicio y algunas pantallas de resultados.

Símbolo	Qué significa
	Sonido y vibración ACTIVADOS
	Sonido y vibración DESACTIVADOS
	El sensor se comunica con el lector
	El sensor no se comunica con el lector

Consulte el Manual del usuario para ver símbolos adicionales.

Si siguió las instrucciones que se describen en el Manual del usuario y continúa teniendo dificultades para configurar su sistema, o si no está seguro acerca de un mensaje o lectura, comuníquese con su profesional de la salud.

The sensor housing, FreeStyle, Libre, and related brand marks are marks of Abbott. Other trademarks are the property of their respective owners.
©2024 Abbott ART51137-002 Rev. A 06/24

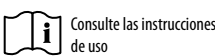

Fabricante
Abbott Diabetes Care Inc.
1360 South Loop Road
Alameda, CA 94502 USA

