

CONSEJOS PARA NIÑOS



FreeStyle
Libre 2

Recuerda estas cosas importantes:



El sensor se tiene que colocar en la parte posterior del brazo.




Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor cuando vea  durante las 12 primeras horas de llevar un sensor.



Time	Glucose Level (mg/dL)
10pm	150
2am	200
6am	150



Debo hacer una prueba de glucosa en sangre con mi medidor si creo que el número no coincide con cómo me siento.

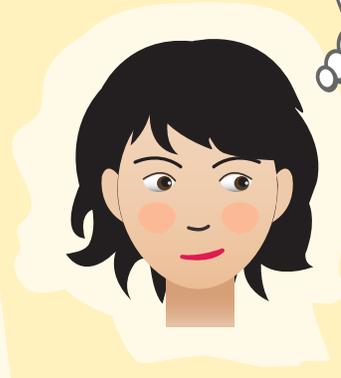


Si me aplico insulina para una comida, no debo aplicarme ninguna insulina más durante 2 horas. Tengo que esperar y vigilar.



¡Importante!

No tome más de 500 mg de suplementos de vitamina C por día. Si lo hace, podrían verse afectadas las lecturas del sensor. Algunos suplementos, como Airborne® y Emergen-C®, contienen más de 500 mg de vitamina C.

Mi lector

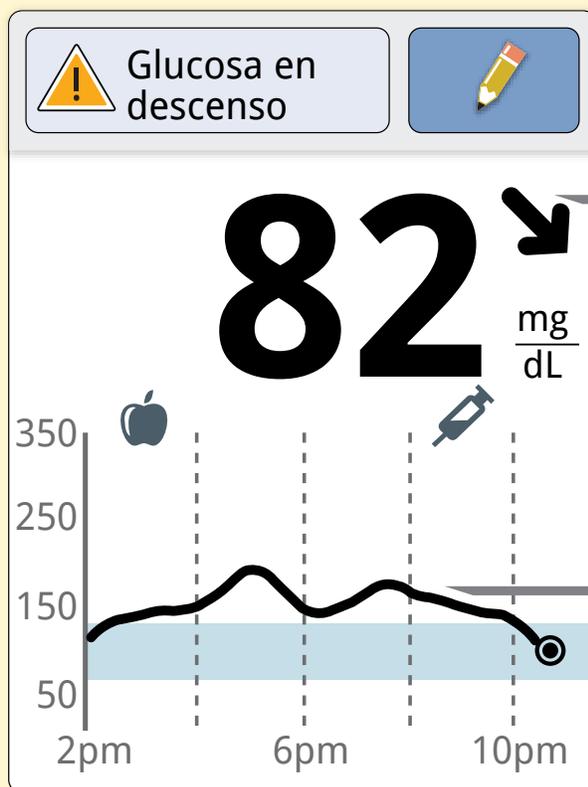

Esta flecha me indica hacia dónde se dirige mi glucosa

Mis resultados de glucosa de las últimas 8 horas